

# DÉROULEMENT D'UNE INTERVENTION

1



Le patient réagit-il ?

2




Appelez les services d'urgence !

3



Munissez-vous d'un DAE.

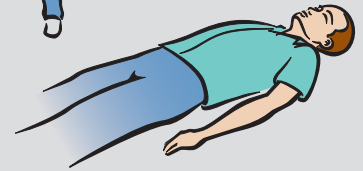

4



Posez le DAE sur le sol. Ouvrez le couvercle.

5



Enlevez les vêtements. Dénudez le thorax.

6



Placez les électrodes.

7



Ne touchez pas le patient.

8




Si le système vous y invite, appuyez sur le bouton rouge clignotant.

9



Si un appareil de RCP est disponible, positionnez-le.

10

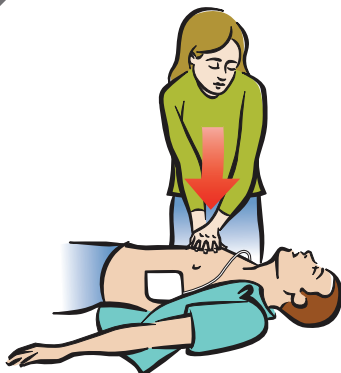

Suivez les invites du DAE. Administrez les compressions.

11



Si le système vous y invite, administrez les insufflations.

## DAE semi-automatisé



Cardiac Science et le logo Shielded Heart sont des marques commerciales de Cardiac Science Corporation.  
Copyright © 2012. Tous droits réservés.  
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186, États-Unis  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hanovre  
Allemagne



70-01091-85rB



# ESECUZIONE DI UN INTERVENTO

1



Il paziente reagisce?

2



Chiamare il servizio di emergenza.

3



Recuperare il DAE.

4



Appoggiare il DAE a terra. Aprire il coperchio.

5




Rimuovere gli indumenti. Esporre il torace.

6



Applicare gli elettrodi.

7

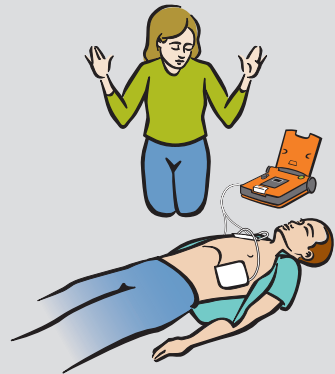

Non toccare il paziente.

8




Se richiesto, premere il pulsante rosso lampeggiante.

9



Se presente, posizionare il dispositivo per RCP.

10

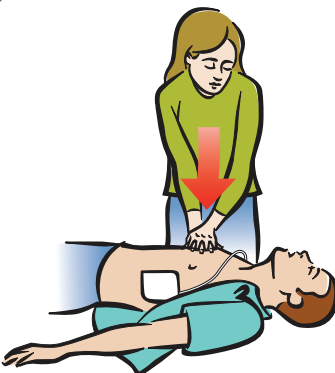

Seguire i messaggi del DAE. Eseguire le compressioni.

11



Se richiesto, dare i respiri.

## DAE semiautomatico



Cardiac Science e il logo Shielded Heart sono marchi di Cardiac Science Corporation.  
Copyright © 2012 Tutti i diritti riservati.  
N7 W22025 Johnson Drive, Waukesha, WI 53186 USA  
[www.cardiacscience.com](http://www.cardiacscience.com)



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germania



70-01091-85rB

